





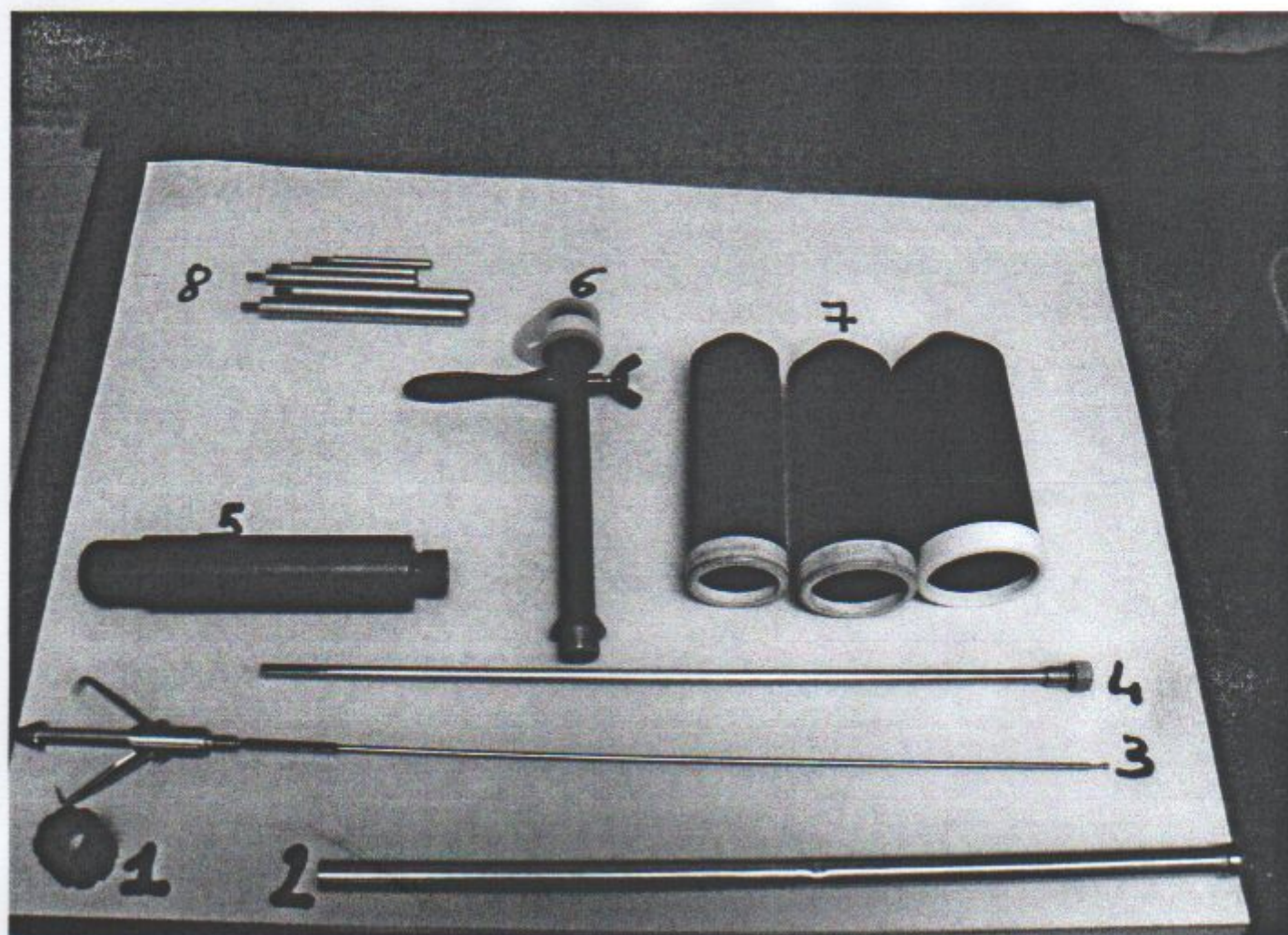


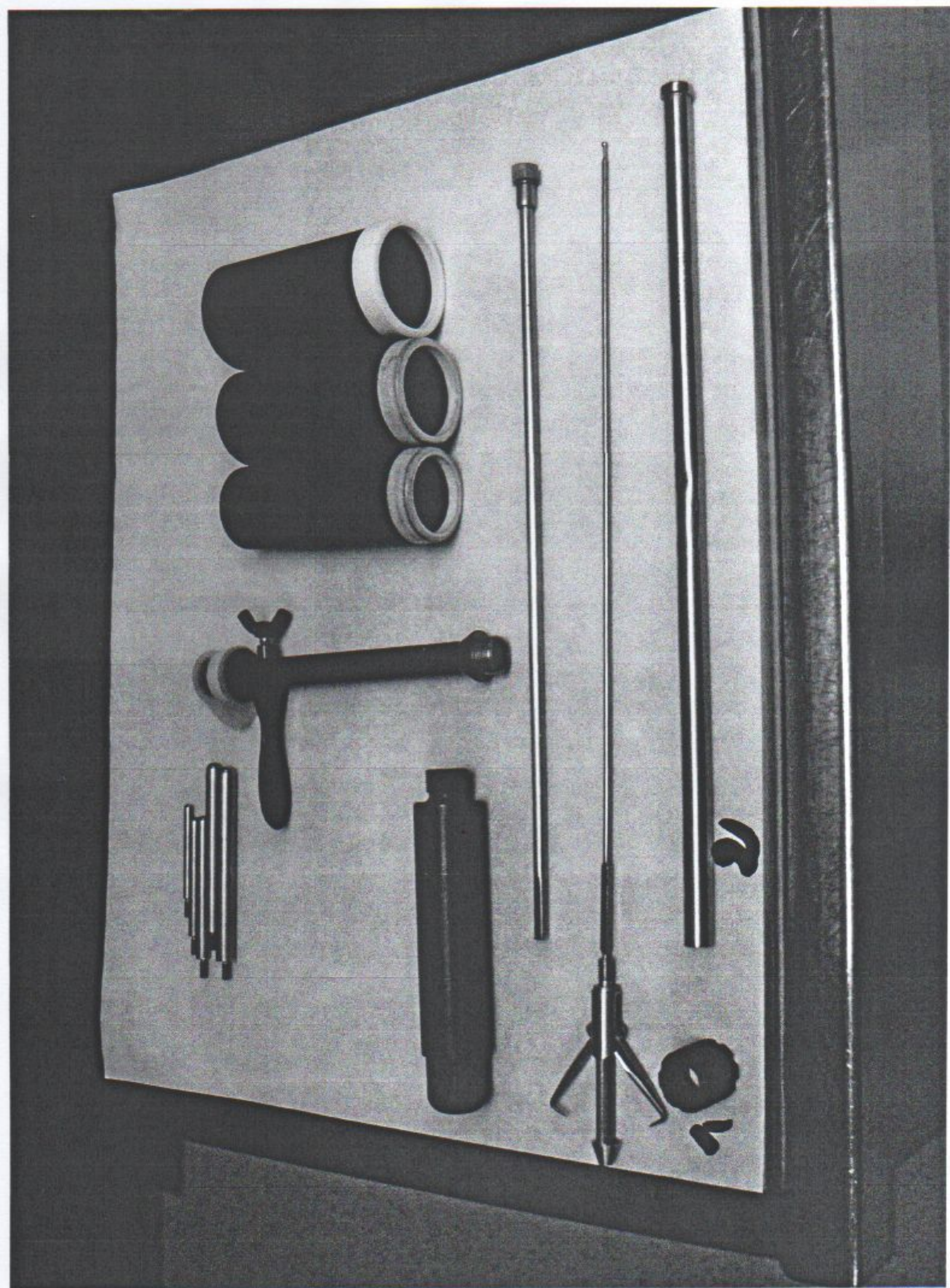

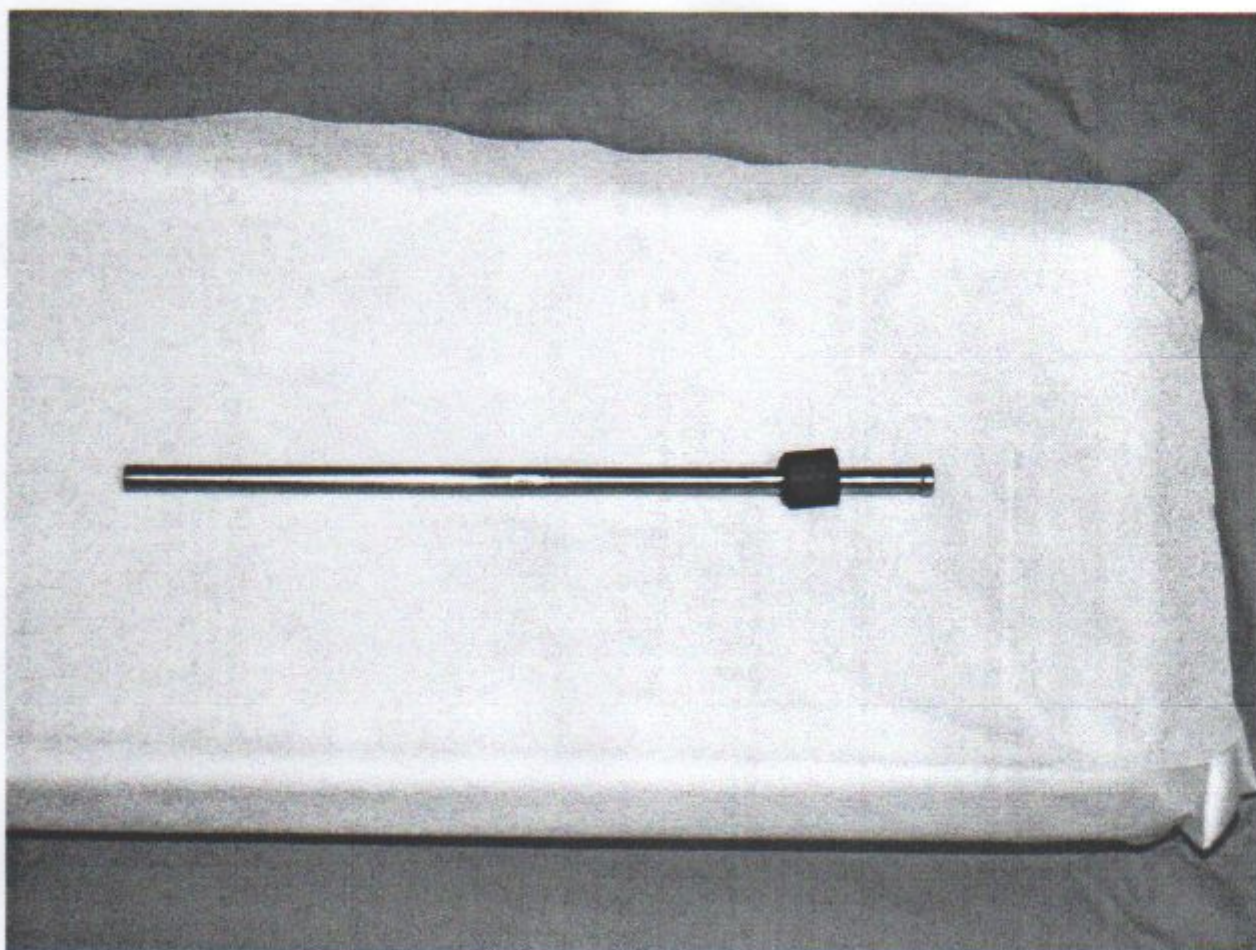



A : Monter la vis n°1 sur le tube n° 2

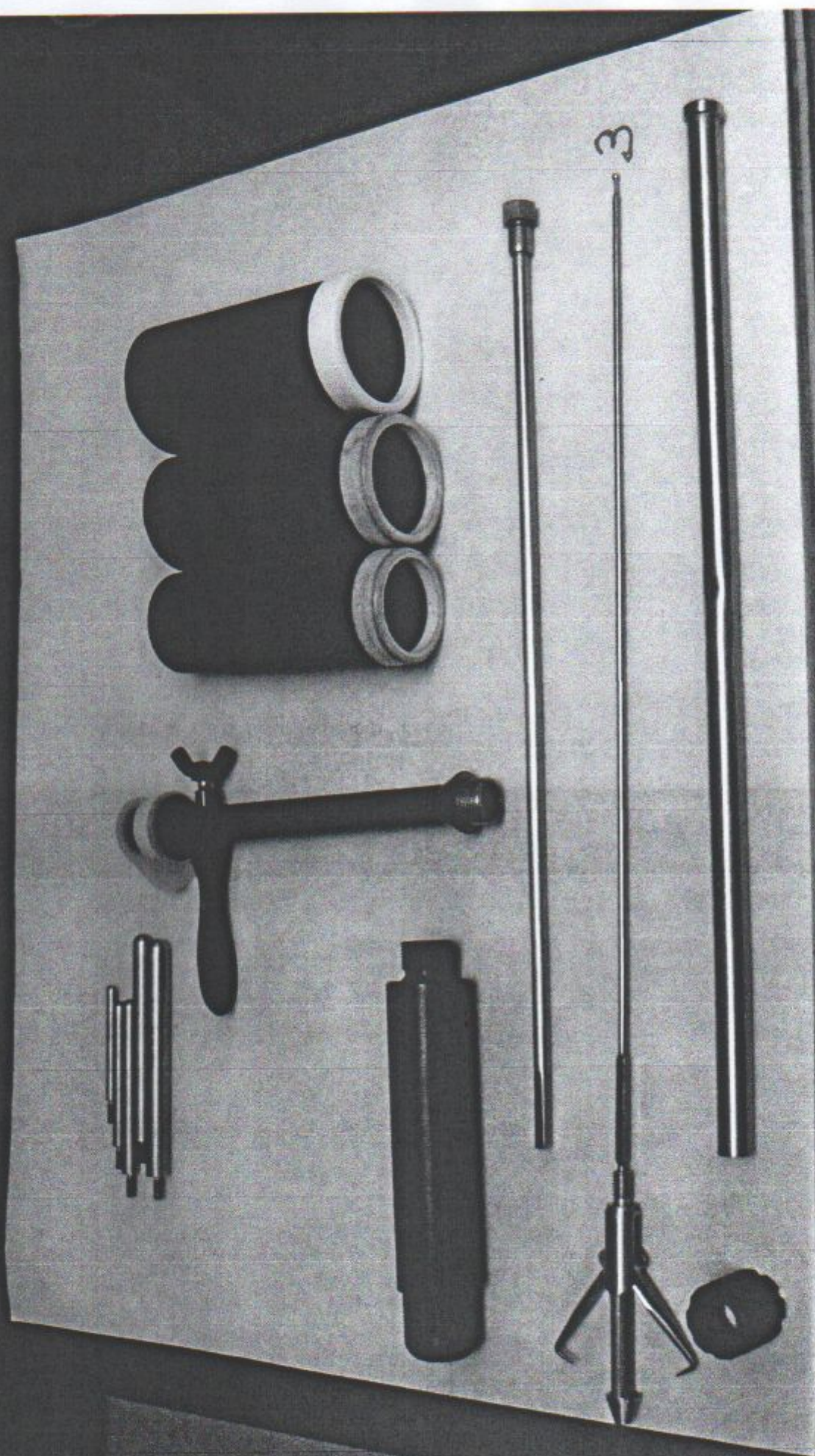

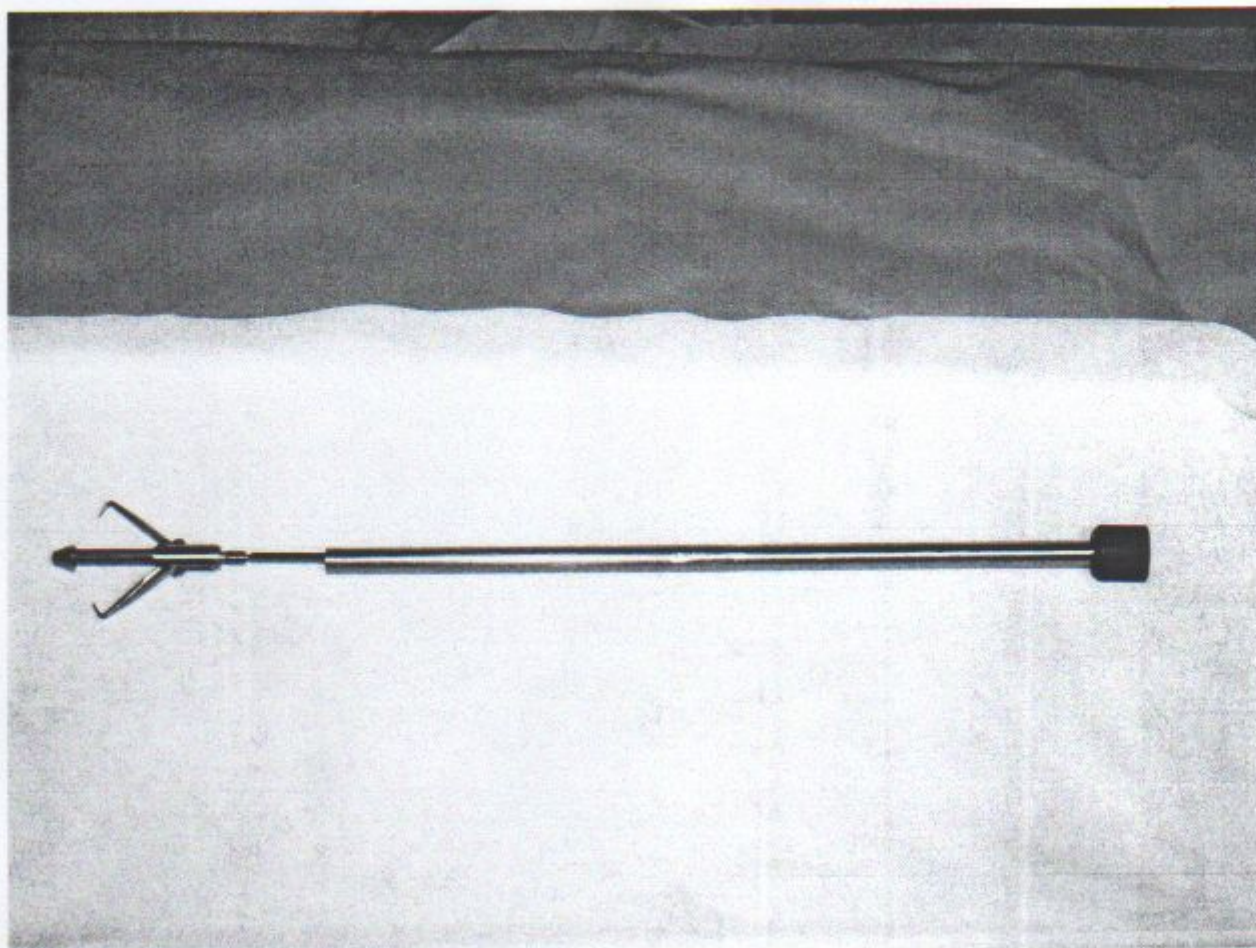



B : Insérer la tige pozzi n°3 dans le kit A

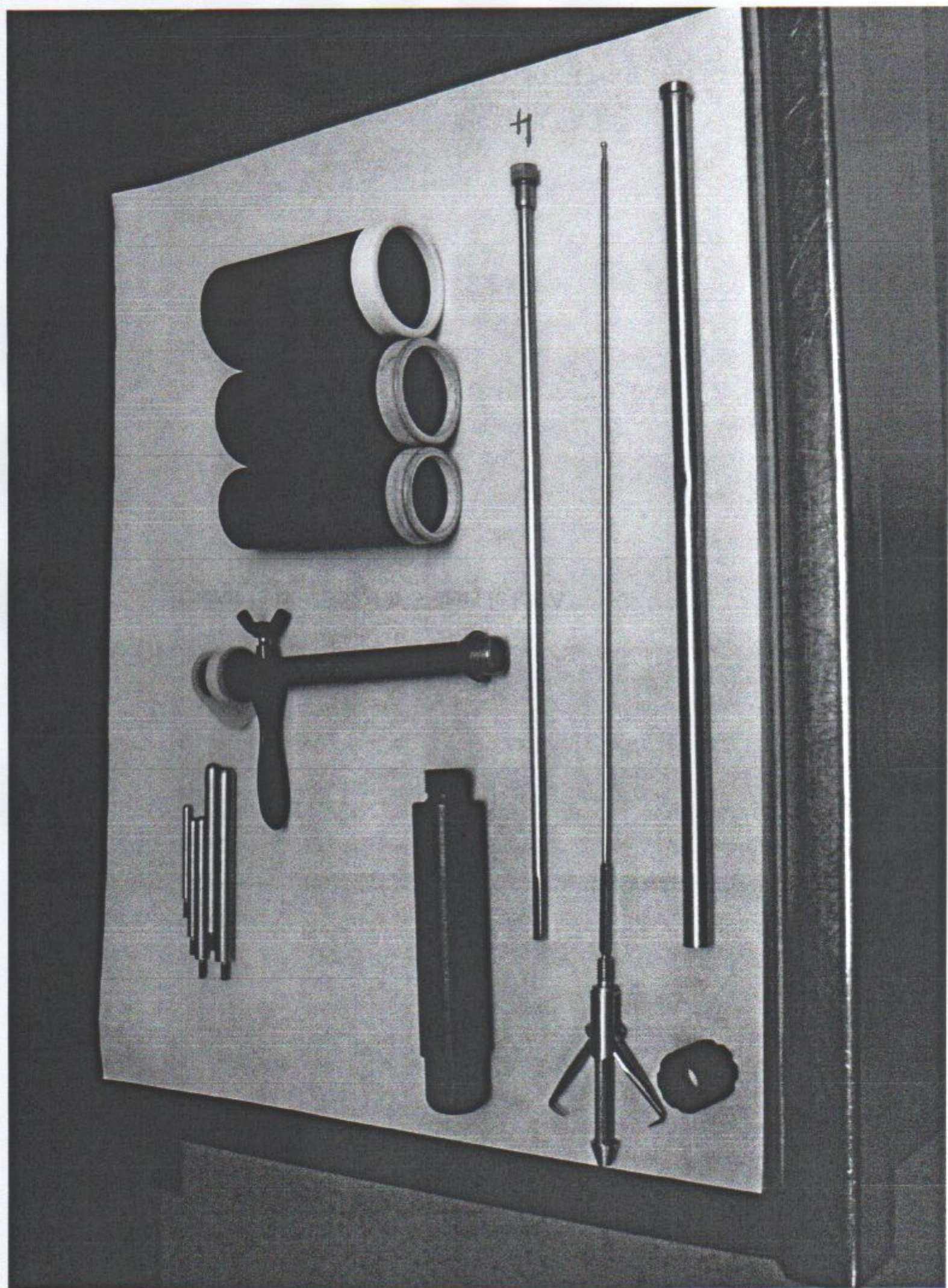

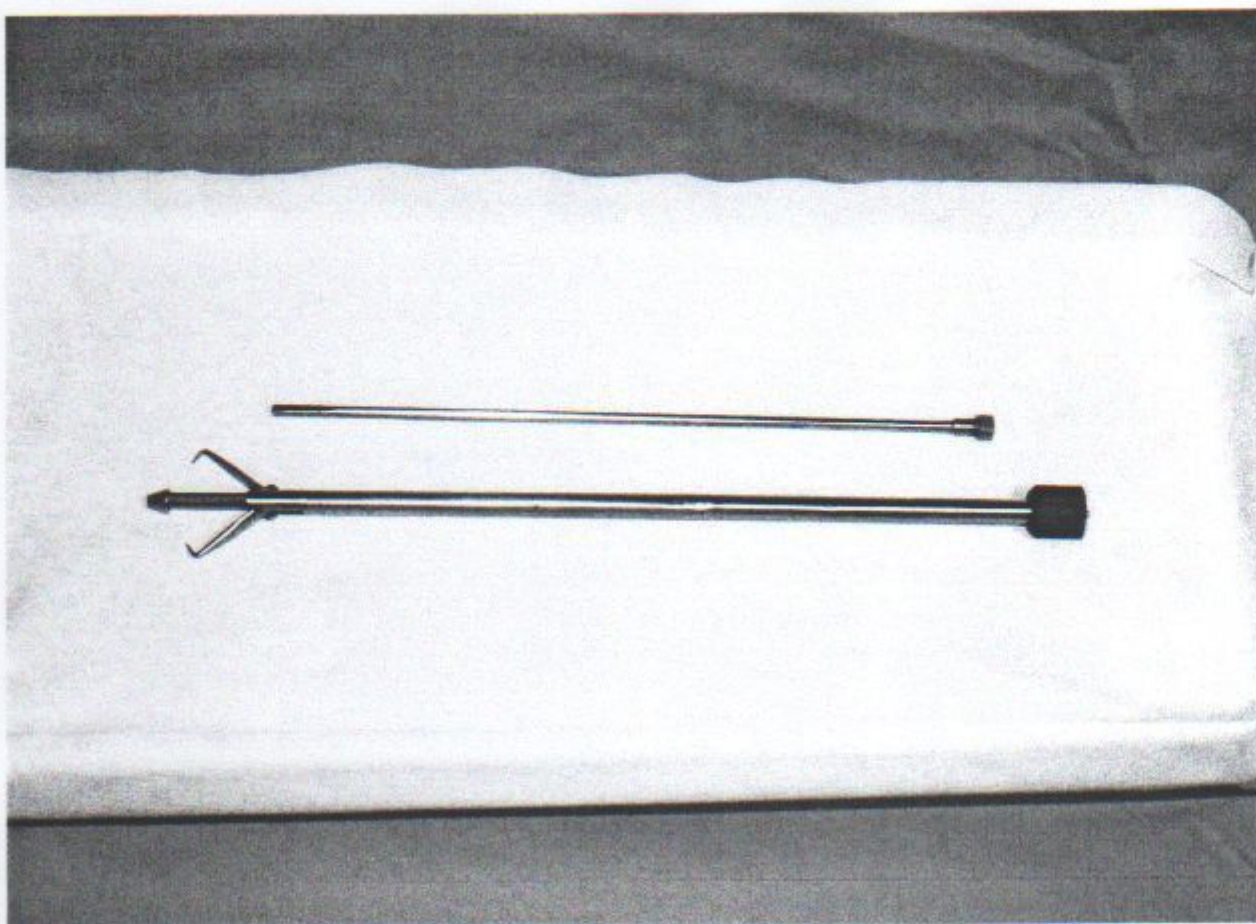


C : Insérer la tige n°4 dans le kit B

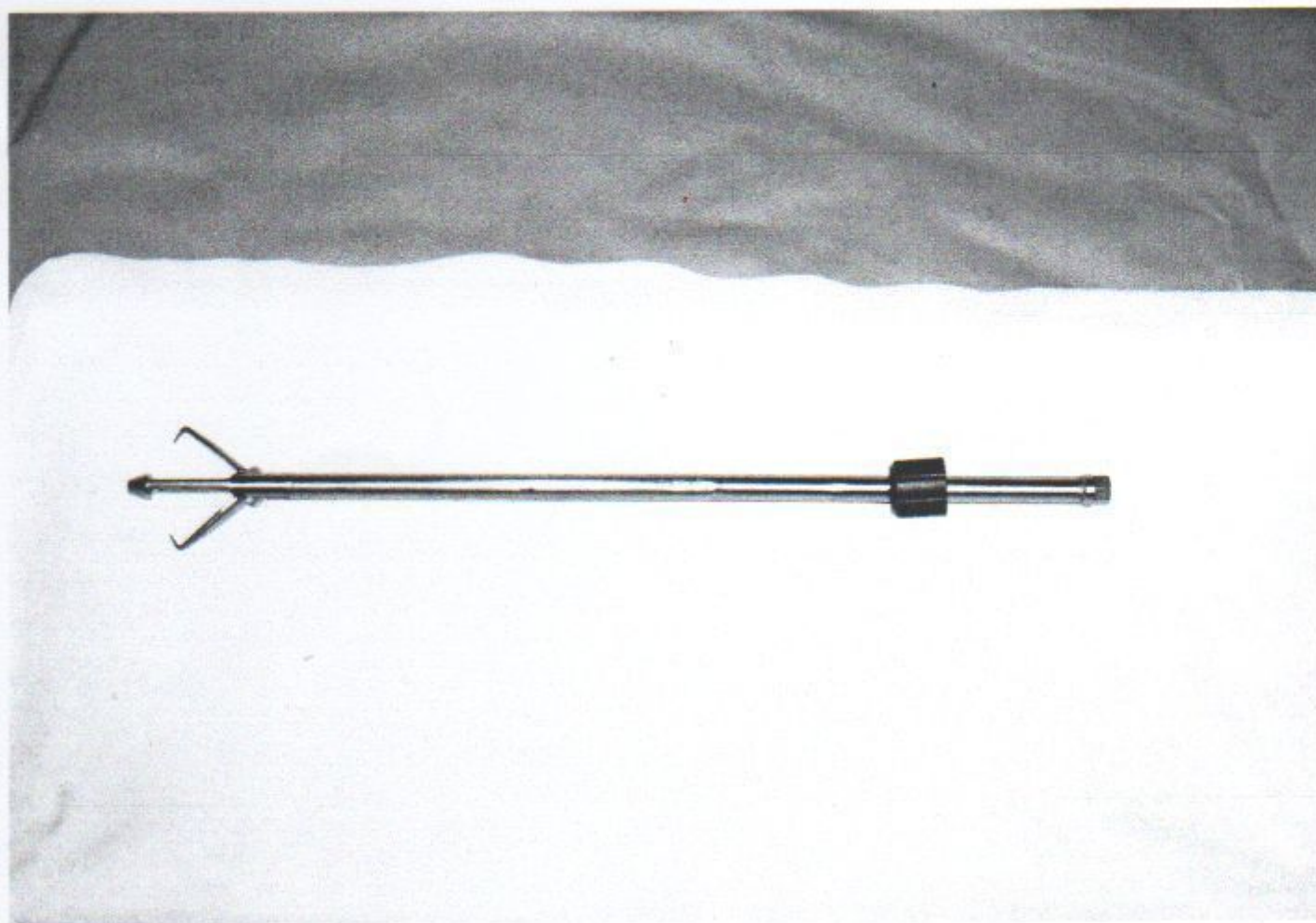

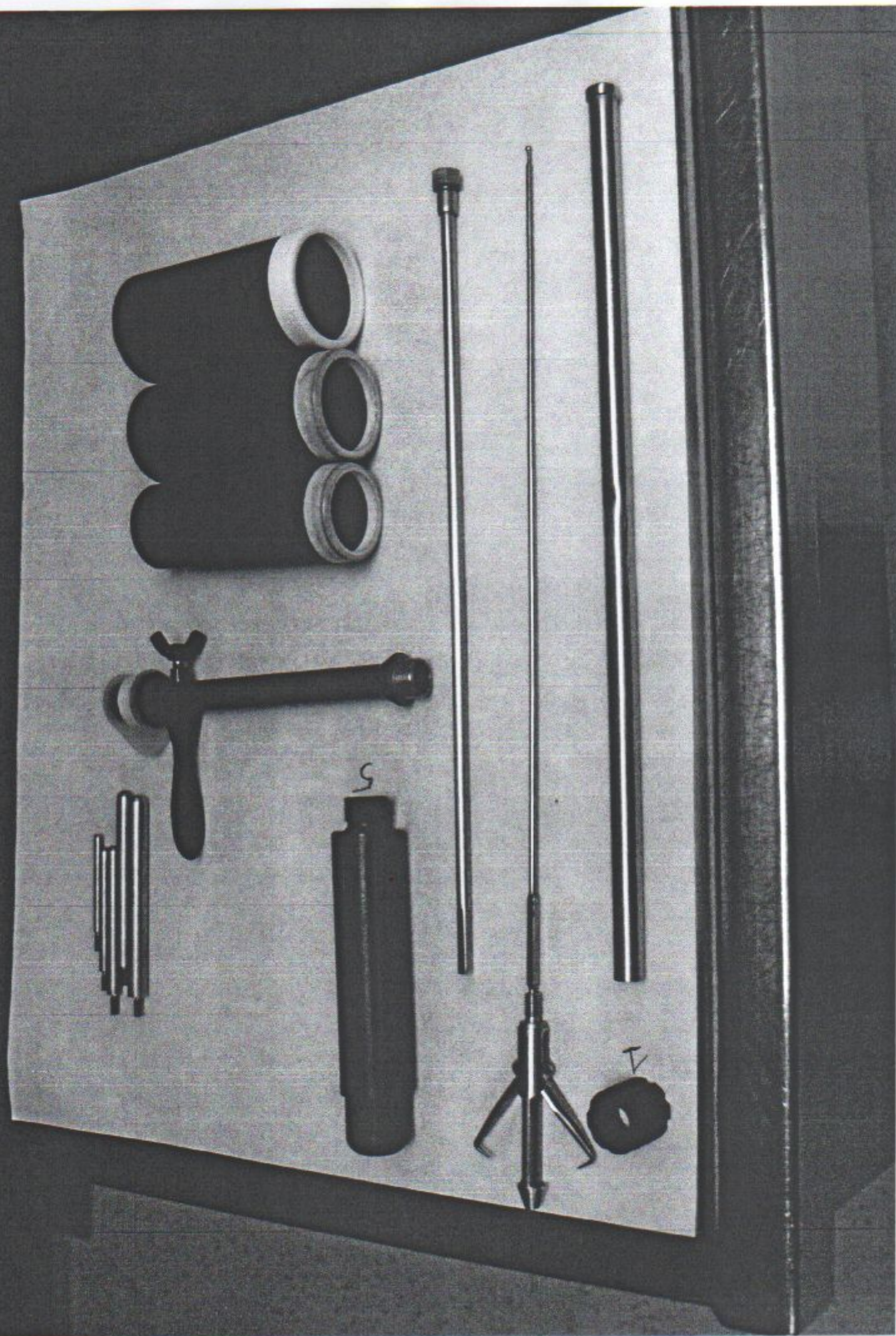





D : Prendre la poignée n°5 , s'assurer qu'elle soit bloquée en position vissée pour que la petite empreinte métal soit apparente. Bien penser à fermer la pozzì sinon son embout rond ne peut pas s'accrocher dans l'empreinte métal de la poignée.
Viser la bague n°1 sur le manche n°5

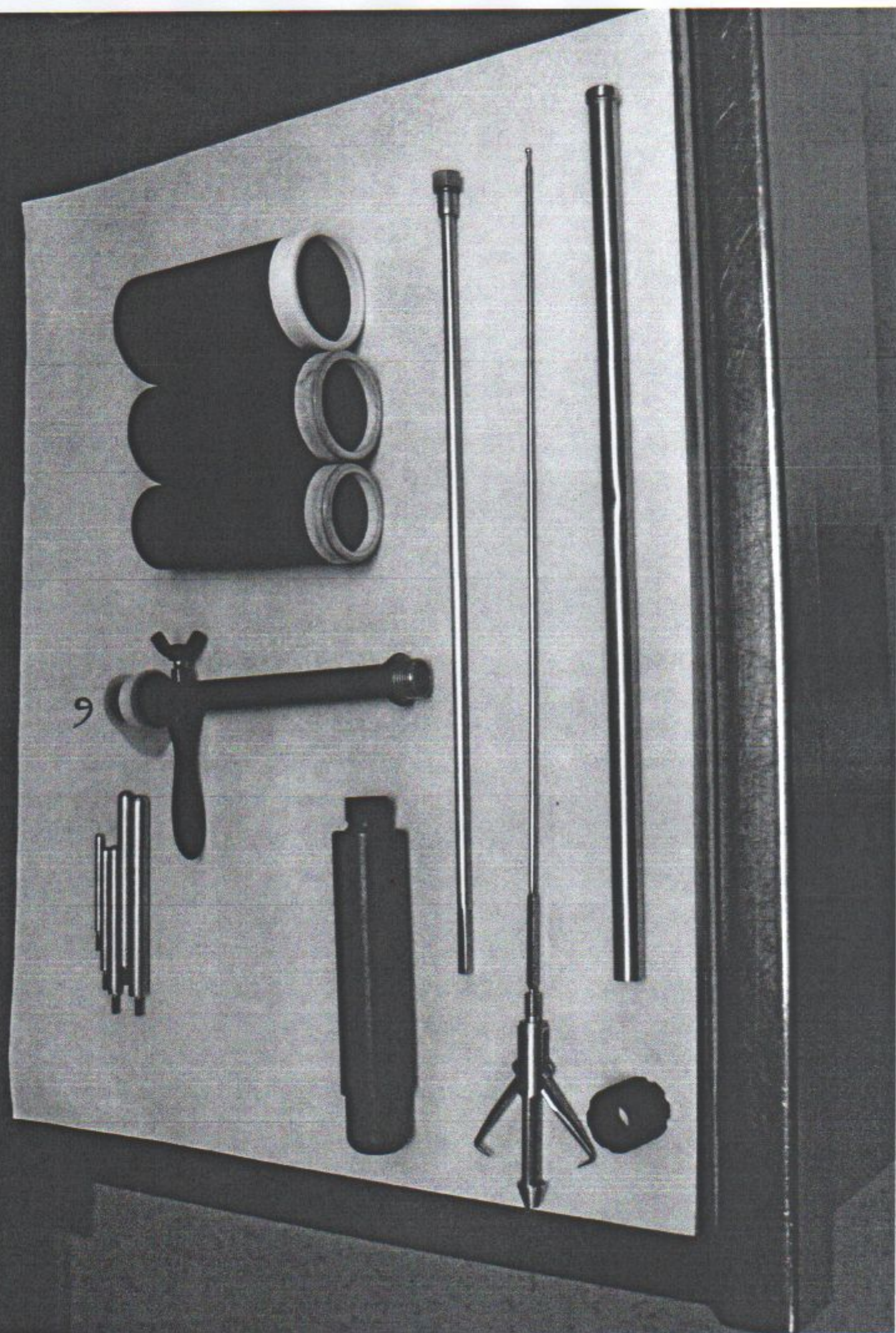





E : Prendre poignée n°6 , dévisser la vis de blocage à ailettes la positionner sur la pozzì fermée , visser cette poignée noire sur le tube à mi hauteur

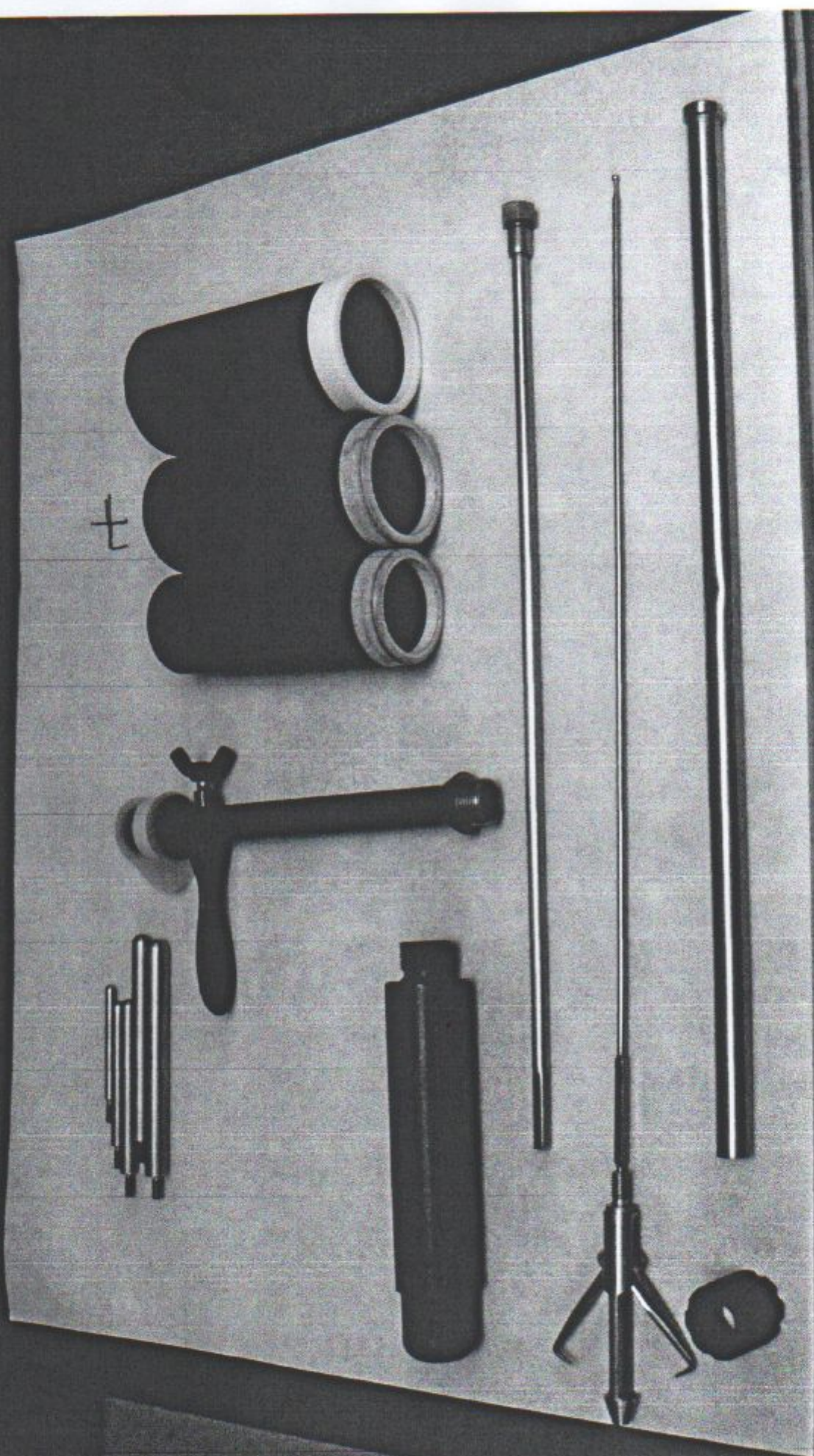

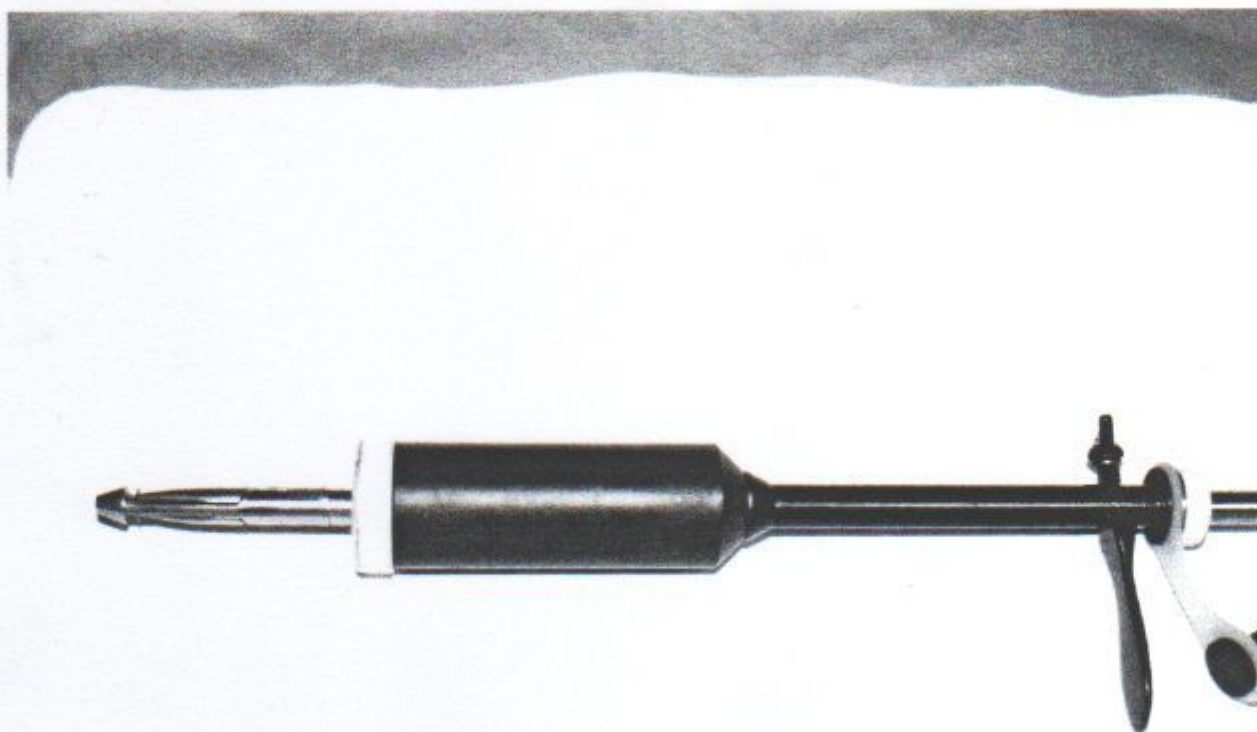

F : Positionner un des 3 cônes n°7 en le vissant sur la poignée n°6

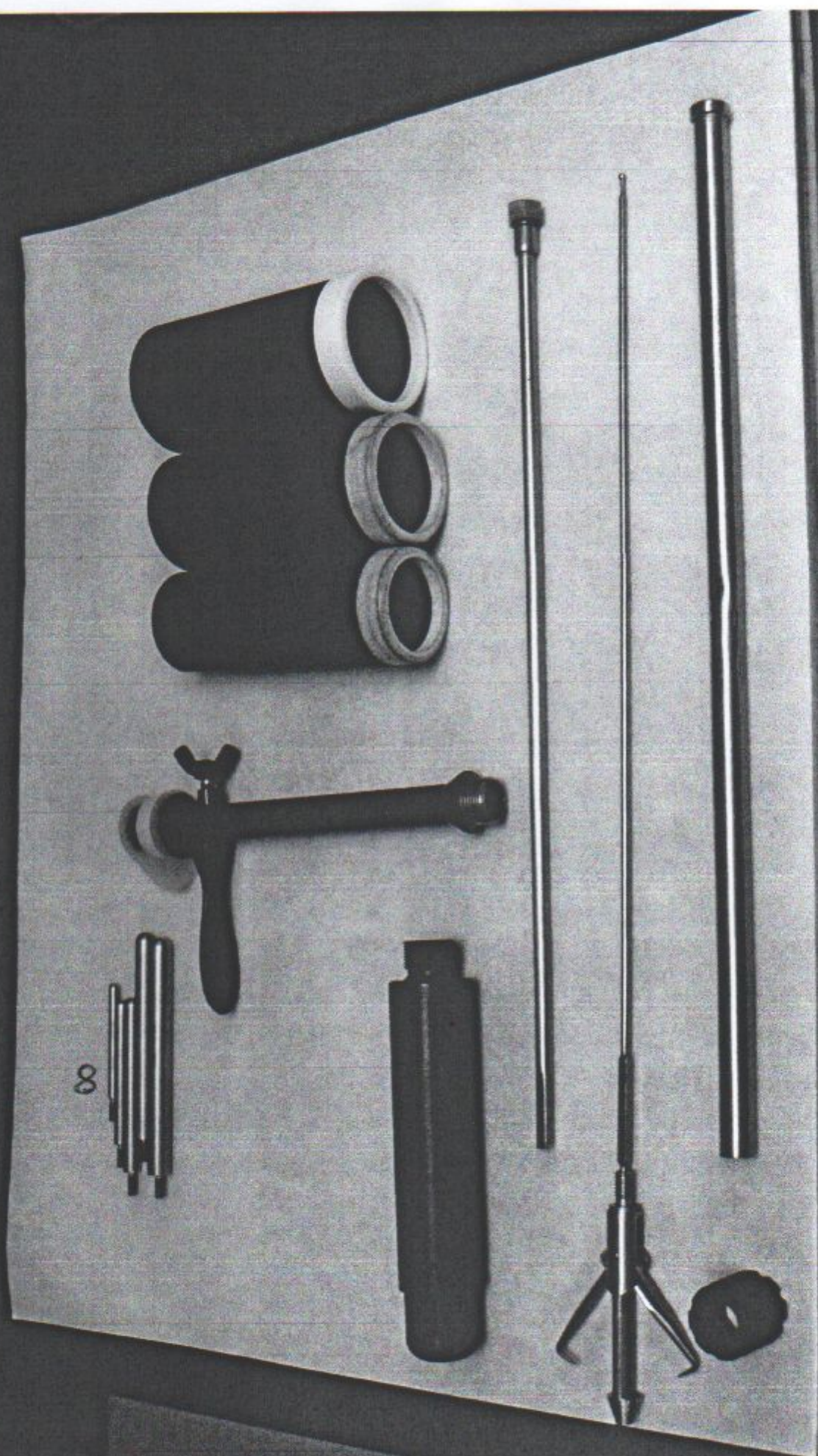

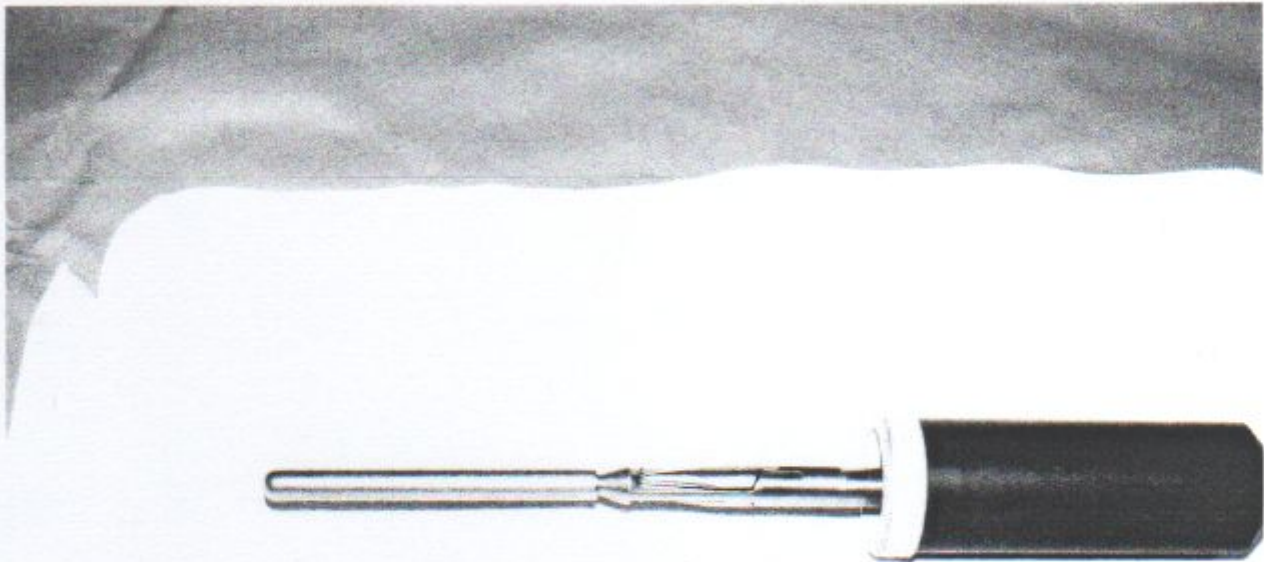

G : Visser une bougie sur la pozzi, le choix du Ø de la bougie dépend de l'hystérométrie : il faut ôter 2 à la mesure de l'hystérométrie