



UROLON

Correction de l'incontinence urinaire

VANTRIS

Traitement du reflux Vesico-renal

EXANTIA

Traitement de l'incontinence anale

VOIE END

SURGYNAL[®]
une expertise, des solutions

www.surgynal.com

Info@surgynal.com

5 chemin du Jubin

69570 DARDILLY [France]

Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58



Fax : +33 (0)4 72 54 65 05

LES INJECTIONS
SOUS-MUQUEUSES PAR VOIE ENDOSCOPIQUE

... Les injections sous-muqueuses par voie endoscopique



Mode d'action UROLON™

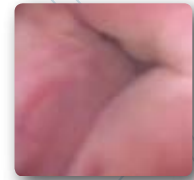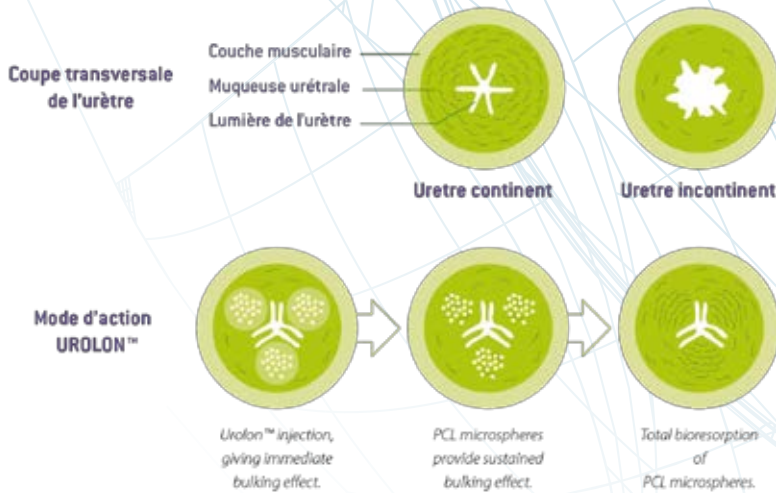


Pour le **traitement de l'incontinence urinaire**, le Kit UROLON permet l'implantation sous-muqueuse simple et efficace de microsphères synthétiques de PolyCaproLactone (PCL) diluées dans une solution saline de, Tampon Phosphate Salin (PBS), de Glycérine et de Carboxy-MethylCellulose (CMC). Dans leur métabolisme respectif, ces différents composés RESORBABLES induisent une Néocollagénèse prédominante de Type 1, permettant une restauration des fonctions du sphincter urinaire.

Un agent de comblement biocompatible NON RESORBABLE, le PPC ou Polyacrylate Polyalcool Copolymère est conditionné différemment pour le **traitement du Reflux-Vésico-Urétéral (Kit VANTRIS)** et le **traitement de l'incontinence anale modérée (Kit EXANTIA)**.

Ce composé, particulièrement stable dans le temps, présente des grosses particules diluées dans une solution de 40% de glycérol (300 microns en moyenne) et assure une efficacité à long terme du traitement.

Procédure reproductible et facile à réaliser Injections réalisées en sous-muqueux Une réaction inflammatoire minime

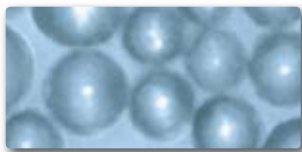

Le kit UROLON

1 une seule référence de disponible :
1001924 (3 seringues pré-remplies de 1ml chacune + aiguille)



le kit VANTRIS*

1 une seule référence de disponible :
BAR-1J (seringue pré-remplie de 1ml)

Plusieurs aiguilles peuvent-être utilisées :

- une aiguille flexible de 3,7Fr x 23G x 350mm référence 37F
- une aiguille flexible de 5Fr x 23G x 350mm référence 50F
- une aiguille métallique semi-rigide avec ouverture latérale de 3,6Fr x 22G x 350mm référence RIN
- une aiguille métallique semi-rigide avec ouverture distale de 3,6Fr x 22G x 350mm référence RINS



Les kits EXANTIA

Existent sous 2 formes différentes :

- Cdt de 4 seringues pré-remplies de 1ml chacune Référence BAF-4
- Cdt 1 seringue de 1ml pré-remplie Référence BAF-1

*ATTENTION : bien vérifier le type de cystoscope à utiliser pour pratiquer les injections